

Валики для массажа.

T20, T10, DD, D10s, RT, RT1, D10, PC, D20, D25, D20s, D15, RC3.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Предназначен для размещения и отдыха, при проведении массажа, косметологических и медицинских процедур.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 Обеспечить достаточный комфорт пациенту

3. ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.1 Отсутствуют

4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1 Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок.

4.2 При температуре воздуха ниже 1°С возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать валики при температуре ниже 1°С более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания валика до комнатной температуры.

4.3 Для предотвращения деформации изделия не следует скручивать или складывать

4.4 Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, дезинфекции и сушки.

Страна производителя	Россия	
Вес изделия	От 0,300 гр. До 1 кг.	
Размеры	55x17x12 (ДхШхВ)	55x20x20 (ДхШхВ)
	55x15x8 (ДхШхВ)	55x25x25 (ДхШхВ)
	55x25x25 (ДхШхВ)	55x20x10 (ДхШхВ)
	55x10x5 (ДхШхВ)	55x15x15 (ДхШхВ)
	55x30x16 (ДхШхВ)	55x10x10 ДхШхВ)
	55x28x17 ДхШхВ)	35x27x5 (ДхШхВ)
Основа	Формовочный поролон	
Отделка	Искусственная кожа высокого качества	
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2013/1292 от 20 ноября 2019 г.		
Не на все Декларация соответствия		

5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

5.1 Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органических растворителей

6. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок на изделие: 1 год.

6.2 Срок службы: не менее 3 года.

6.3 При использовании валика свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта.

6.4 Эксплуатация согласно инструкции, обеспечит максимально эффективное и безопасное использование изделия.

6.5 Гарантия не распространяется на искусственную кожу.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

7.1 Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.